

## Legg til, fjern og flytt trådløst tilbehør med Smooth Lite-applikasjonen – Hurtigguide

Pleiepersonell kan enkelt installere 9Solutions trådløse enheter for beboersikkerhet og integrere dem i pasientvarslingsløsningen ved å bruke QR-koden / strekkoden på enheten.

I tillegg trenger du:

- Tilstedemarkering skilt
- En smarttelefon med Smooth Lite-applikasjonen

**Merk!** Hvis applikasjonen ber om tilgang til kameraet – velg **Tillat bruk av kamera**.

### 1. QR-kode / strekkode

QR-kode / strekkode finnes på alle 9Solutions-enheter.






## 2. Tilstedemarkering



### 3. Smooth Lite-applikasjon

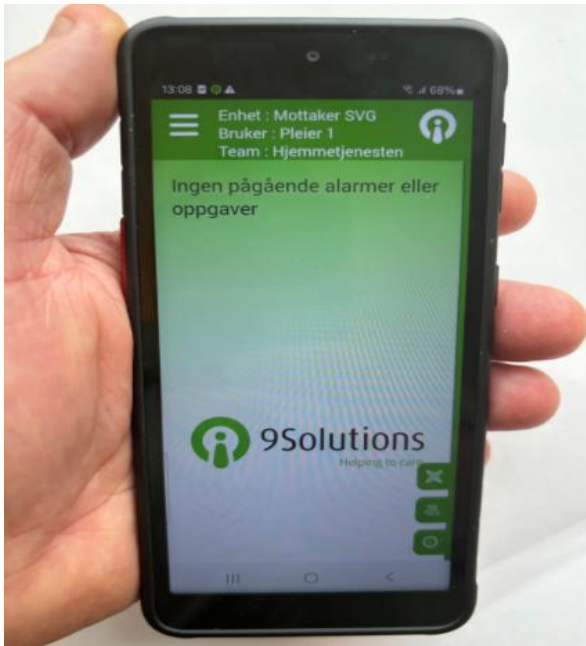

### Skanning av tilstedemarkering skilt med QR-kode

Start alltid med å skanne Tilstedemarkering skilt med Smooth Lite-applikasjonen i rommet der du ønsker å legge til, fjerne eller flytte enheten.

#### 1.

Åpne Smooth Lite-applikasjonen og åpne QR-kodeleseren nederst til høyre.




## 2.

Skann QR-koden på Tilstedemarkering skilt ved å holde den foran kameravinduet slik at hele koden er synlig. Hold telefonen stødig cirka 10–20 cm fra koden.

Enheten skanner automatisk.

**Merk!** Hvis rommet er mørkt, kan du slå på lommelykten via lampeikonet.

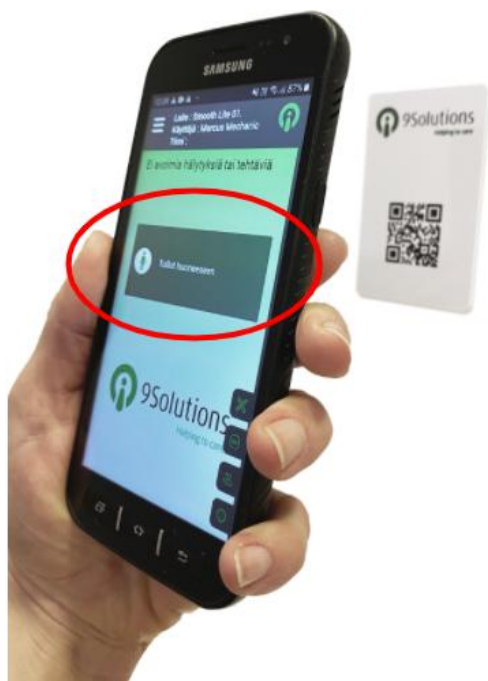

### 3.

Applikasjonen viser melding når taggen er lest korrekt:

- "Kom inn i rommet"
- "Gikk ut av rommet"

## Legge til en enhet 1/2

Skann Tilstedemarkering skilt og gå til menyen for enhetsadministrasjon i Smooth Lite-applikasjonen.

### 1.

Skann Tilstedemarkering skilt i rommet der du ønsker å legge til enheten.




2.

Velg **“Enheter”**



### 3.

Velg **“Legg til Enhet”**

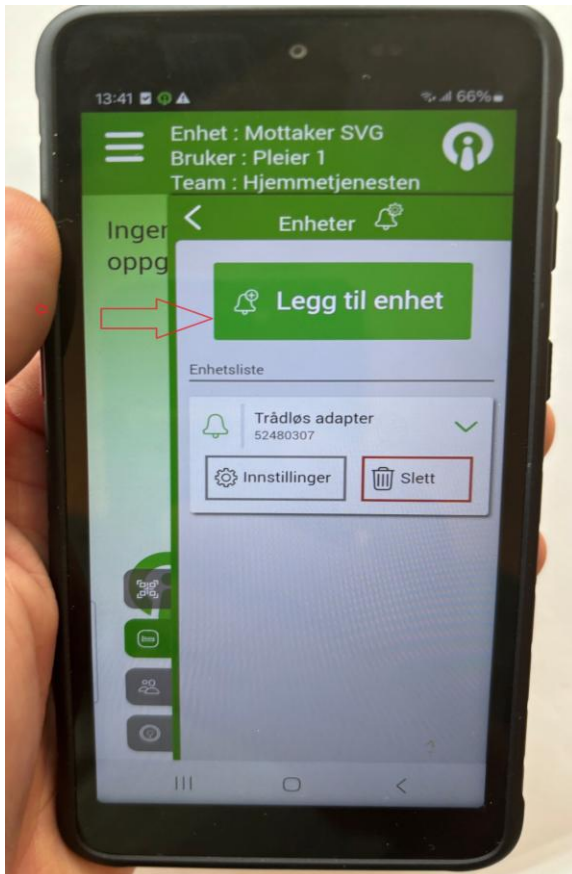

## Legge til en enhet 2/2


Aktivering og registrering av enhet i rommet.

### 4.


Skann QR-koden / strekkoden på enheten ved å holde den foran kameravinduet slik at hele koden er synlig. Hold telefonen cirka 10 cm fra koden.

Enhetsnummeret skanner automatisk.

**Merk!** Hvis rommet er mørkt, kan du slå på lommelykten via lampeikonet.

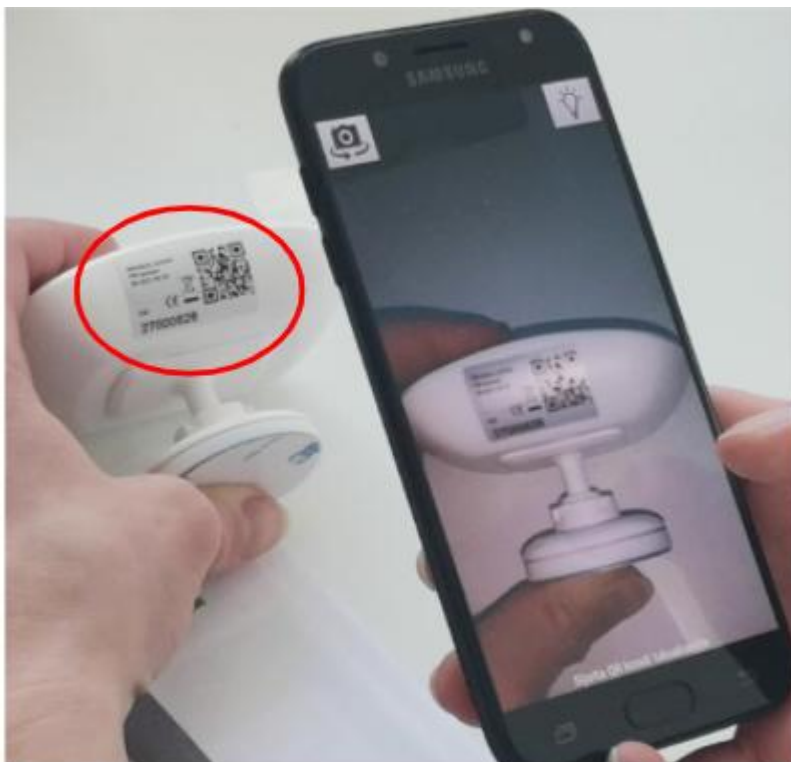


**5.** Meldingen "Enhet lagt til" viser at enheten er lagt til i rommet.

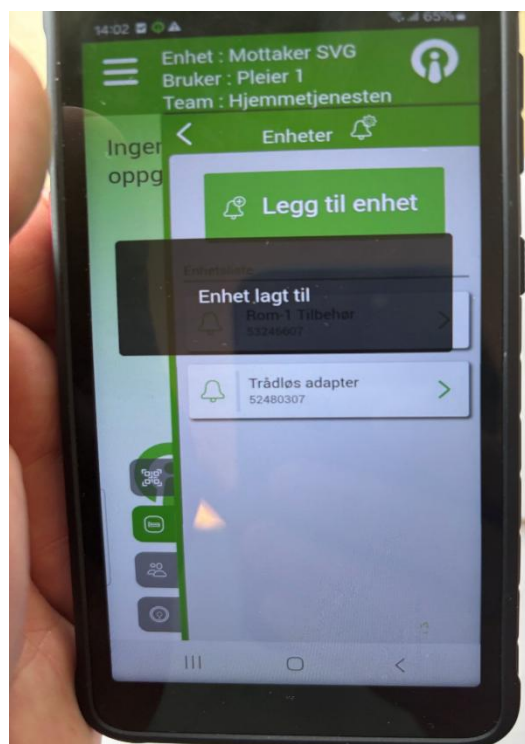

**6.**

Den nye enheten vises nå i enhetslisten.

Fest enheten i henhold til instruksjonene.

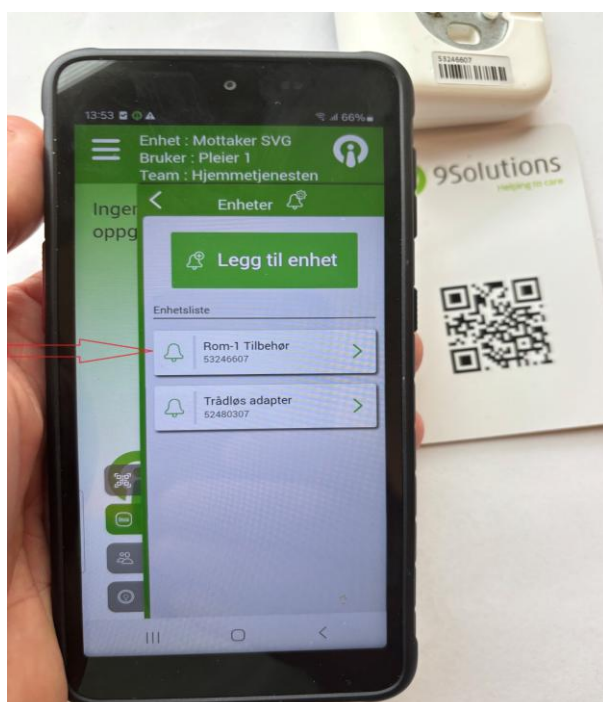


## Aktivere og teste enheten

Aktiver alarmene og test at enheten fungerer.

### 1.

Aktiver enheten ved å velge **“Forlat rommet”**.

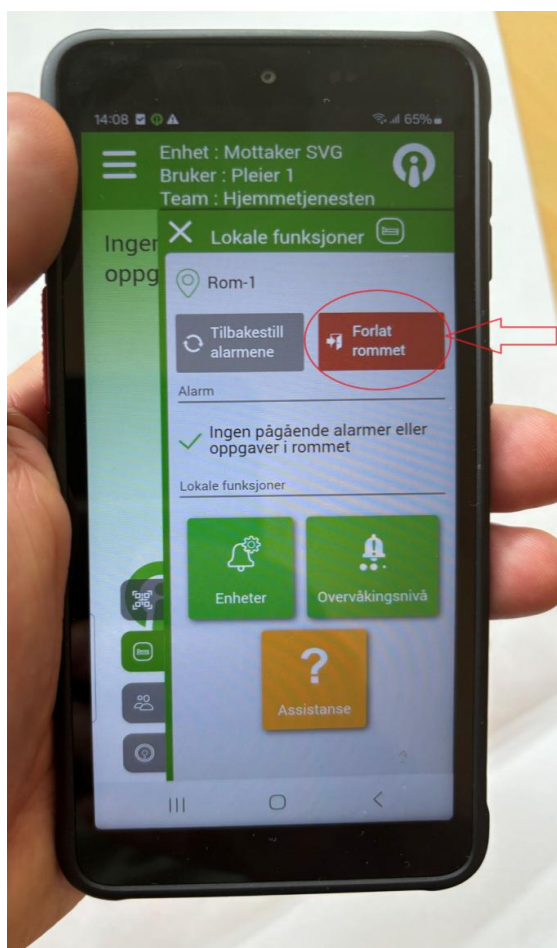

Du vil motta meldingen **“Gikk ut av rommet”**, og alarmene på enheten blir aktivert.

## 2.

Test at enheten sender alarm med korrekt informasjon, og nullstill testalarmen.



## Fjerne en enhet 1/2

Hvordan deaktivere enheten.


### 1.

Skann Tilstedemarkering skilt i rommet der du ønsker å fjerne enheten.



2.


Velg **“Enheter”**

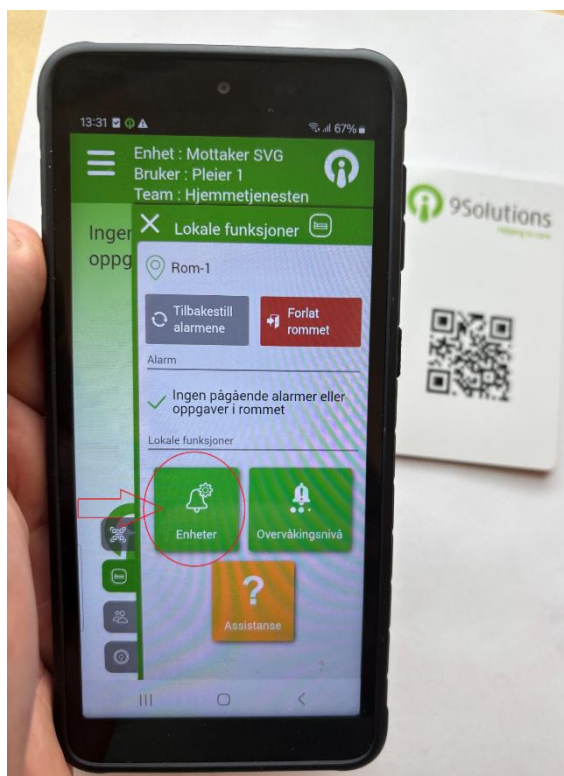

### 3.

Velg enheten du ønsker å fjerne/deaktivere.

Trykk "Slett knapp"

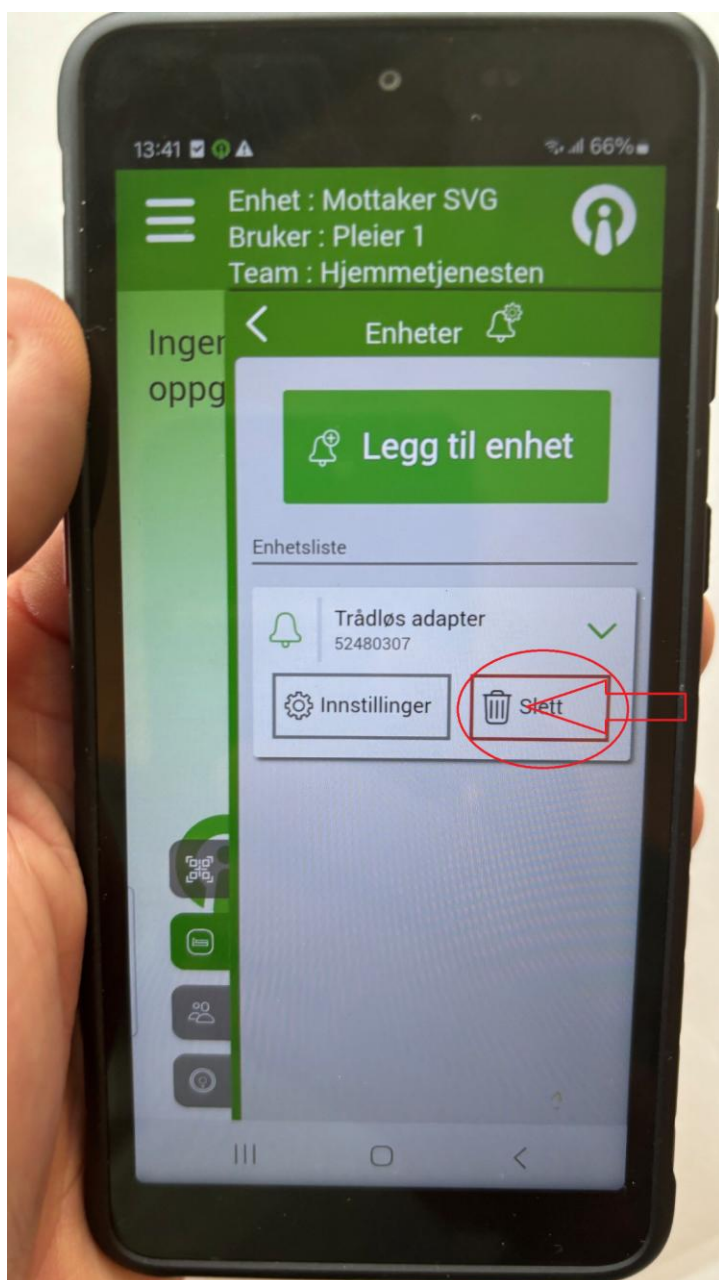

## Fjerne en enhet 2/2

Fjern enheten og bekreft handlingen.

### 4.

Applikasjonen ber om bekreftelse.

Velg:


**“ Fjerne ”**



**Merk!** Den fjernede enheten kan installeres i et annet rom ved å følge instruksjonene.

## 6.

Til slutt velger du **“Forlat rom”** for å logge ut av rommet.

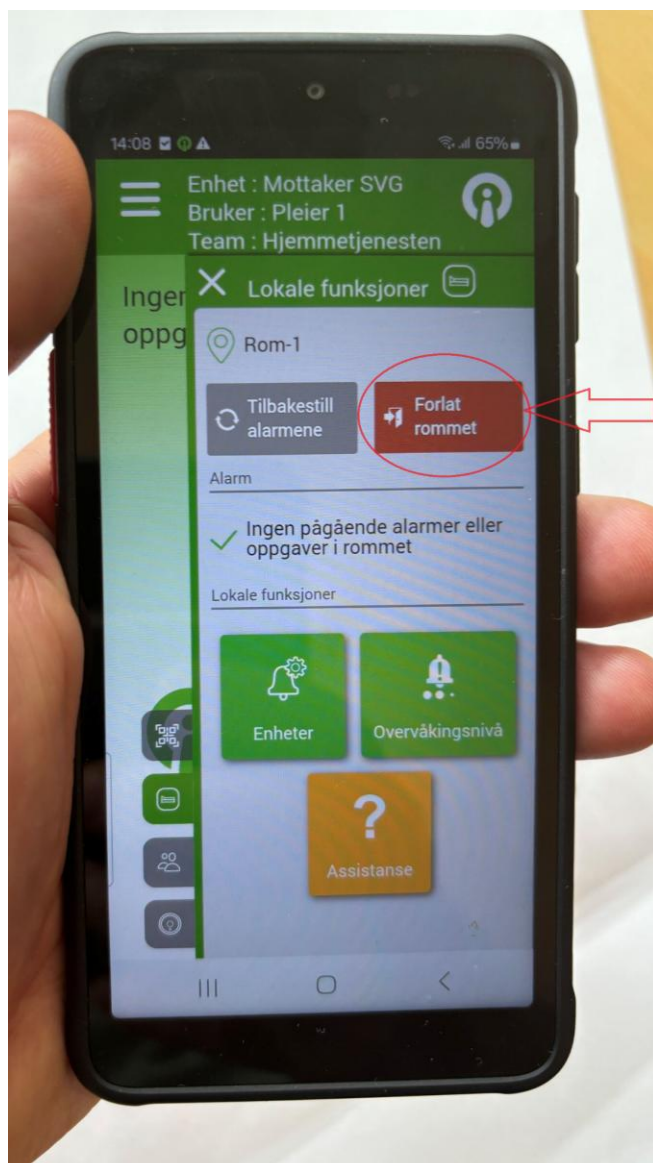

## Flytte en enhet 1/2

Hvordan flytte enheten til en annen persons rom.

### 1.

Skann Tilstedemarkering skilt i rommet der du ønsker å legge til enheten.



## 2.

Velg **“Enheter”**



## 3.

Velg **“Legg til Enhet”**

## Flytte en enhet 2/2

Installer enheten i et nytt rom ved å skanne QR-koden / strekkoden og test deretter enheten.

## 4.

Skann QR-koden / strekkoden på enheten ved å holde den foran kameravinduet slik at hele koden er synlig. Hold telefonen cirka 10 cm fra koden.

Enheten skanner automatisk.


**Merk!** Hvis rommet er mørkt, kan du slå på lyset via lampeikonet.



## 5.


Applikasjonen viser at enheten allerede er installert. Smooth Lite-applikasjonen vil deretter spørre om du ønsker å erstatte eksisterende installasjon før enheten installeres i det nye rommet.

Velg **“Flytt til dette stedet”**

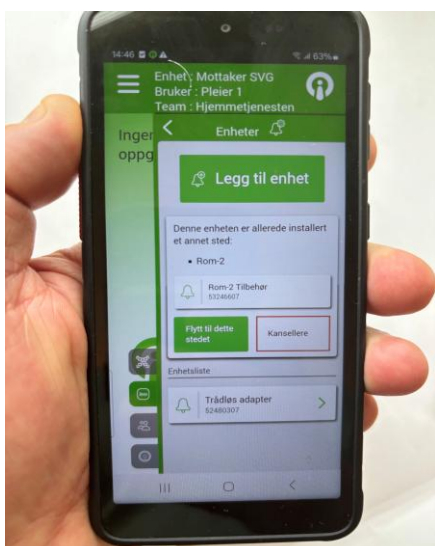

## 6.

Den nye enheten vises i enhetslisten.

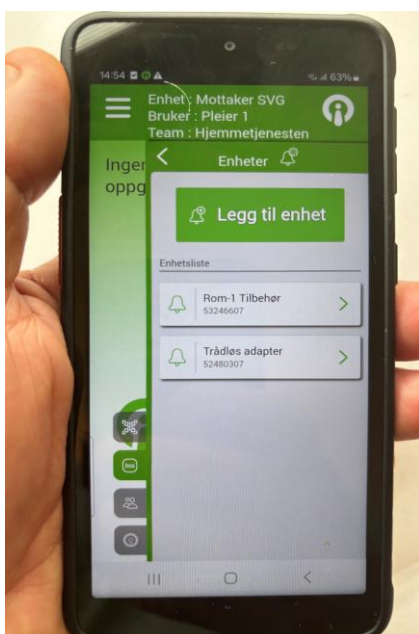

## 7.

Velg **"Forlat rom"** for å logge ut når du forlater rommet.

Du vil motta meldingen **"Gikk ut av rommet"**, og alarmene på enheten blir aktivert.



Test deretter at enheten sender alarm med korrekt informasjon og nullstill testalarmen.