


Trådløs dørsensor - 9S-ACC-02-33 - Montering av enheten

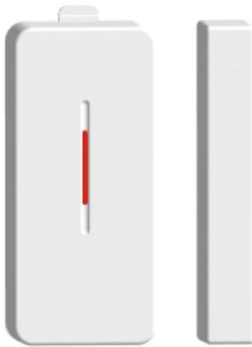

Den trådløse dørsensoren er utviklet for å identifisere behov for assistanse, spesielt i situasjoner der beboere i institusjon har en tendens til å forlate rommene sine om natten. Det kan være høy risiko for fall eller at de går seg bort når de beveger seg rundt på egenhånd. I tillegg, ved alenearbeid på natt og særlig ved mulig risiko for vold, bidrar sensoren til økt sikkerhet for personalet ved å utløse alarm når en beboer har forlatt rommet.

Bruksområder:

Eksempel 1

En beboer forlater rommet sitt om natten. Vedkommende har gangvansker og det er høy risiko for fall når han/hun beveger seg alene. En montert trådløs dørsensor registrerer når døren åpnes. Sensoren sender en alarm til personalets telefon, slik at sykepleier får beskjed om hvilken dør som er åpnet og at beboeren muligens har forlatt rommet. Personalet kan raskt komme til for å bistå.

Eksempel 2

En beboer har tendens til å vandre om natten og finner ikke veien tilbake til eget rom. Han kan ved et uhell gå inn på andre beboeres rom. En trådløs dørsensor sender alarm umiddelbart når en dør åpnes. Alarmen inneholder informasjon om hvilke dører som er åpnet, slik at personalet raskt kan komme til riktig sted og følge beboeren tilbake til eget rom.

Pakken med trådløs dørsensor inneholder:

- Dørsensor og magnetdel
- Dobbeltsidig tape (forhåndsmontert på enheten)
- Batterier (forhåndsinstallert)



Montering av enheten:

Den gjenbrukbare tapen for dørsensoren har to sider: myk og ru.


Tapen med myk overflate festes til enheten, og den ru siden festes til overflaten der enheten skal monteres.

Monter enheten på korridorsiden av døren i ca. 170 cm høyde.



Monter enheten på håndtakssiden av døren (ikke hengselsiden).

Du kan montere enheten på døren og magnetdelen på dørkarmen, eller omvendt. Monteringsmetoden avhenger av karmens bredde og om døren er høyre- eller venstrehengslet.

Avstanden mellom enheten og magnetdelen skal være maks. 1 cm.

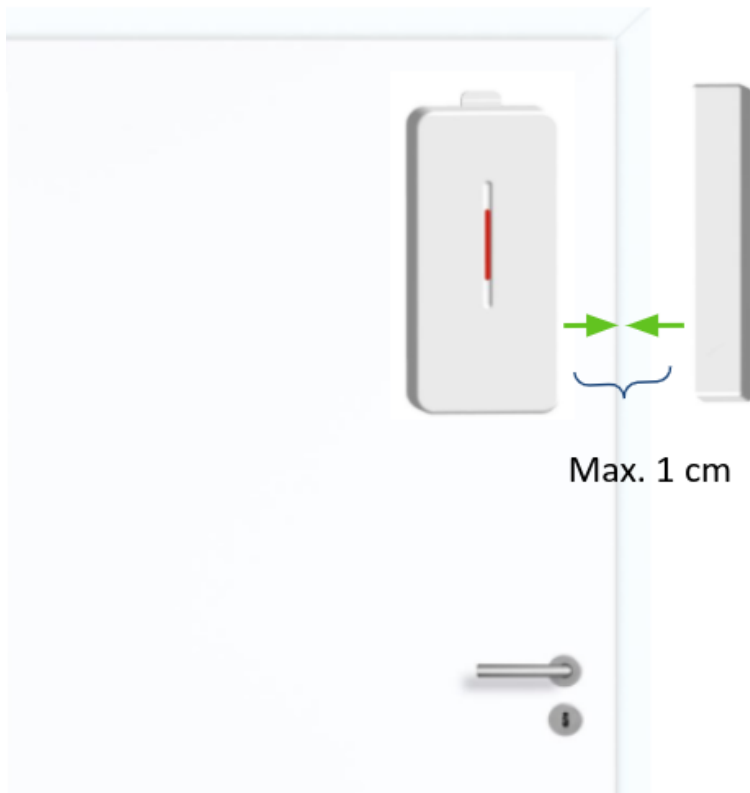

Tapen er forhåndsmontert på baksiden av dørsensoren og magnetdelen.

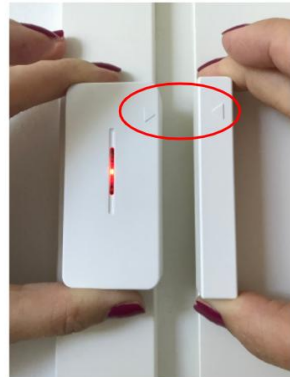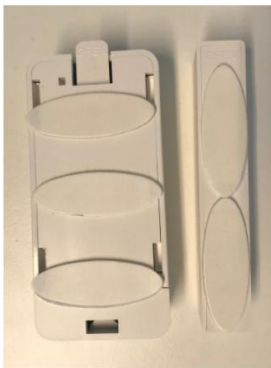

Fjern beskyttelsesfilmen fra tapen.

Kontroller at:

- pilene på sensoren og magnetdelen er justert og i samme høyde (enklest å kontrollere

når døren er lukket)

- avstanden mellom sensor og magnetdel er maks. 1 cm når døren er lukket. Hvis avstanden er større, vil enheten ikke fungere pålitelig.

Flytting av enheten:

Hvis du ønsker å flytte enheten til et annet sted:

- Løsne enheten ved å vri den slik at tapeflatene skilles fra hverandre. Den ru tapen kan stå igjen til senere bruk.
- Ta nye ru tapestrips fra pakken.
- Fest de nye ru tapestripene på den myke tapen på enheten. Tapen på enheten trenger ikke byttes.
- Fjern beskyttelsesfilmen og trykk enheten på plass på det nye stedet.